

www.adventlife.net

КОМБИНИРАН ТЕСТ ЗА НАРКОТИЦИ (Амфетамин, Марихуана, Кокаин и Опиати) (в домашни условия)



БЪРЗ



ЛЕСЕН



ТОЧЕН



ADVENT *life*
Health in Your Hands

SAFECARE

Нашата амбиция е да направим здравеопазването широко достъпно в световен мащаб, чрез бързи тестове за лична употреба.

Водени от иновативен дух, **Advent Life** специализира в производство и разпространение на бързи тестове за широк спектър от здравословни състояния като същевременно предлага и други продукти, които позволяват на всеки да се погрижи за здравето си. Даваме възможност на хората да направят първата крачка сами и в удобно за тях време.

Advent Life се фокусира върху най-доброто качество на безопасни и лесни за използване продукти. Предлагаме премиум марки, които се доставят до аптеки, болници, лаборатории, обществени организации и държавни институции.

За повече информация, посетете www.adventlife.net.

КОМБИНИРАН ТЕСТ ЗА НАРКОТИЦИ (ПРОБА ОТ УРИНА)**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Комбинираният тест за наркотици (проба от урина) е бърз хроматографски имуноанализ* за качествено и навременно откриване на четири наркотика в човешката урина: Амфетамин, Марихуана, Кокаин и Опиати. Определените гранични концентрации за тези вещества са, както следва:

AMP (Амфетамин) - 1000ng/mL (Може да се открие до 2 дни след употреба).


THC (Марихуана) - 50ng/mL (Може да се открие от няколко часа до 3-5 дни след употреба).

COC (Кокаин) - 300ng/mL (Може да се открие до 3 дни след употреба).

OPI (Опиати) - 2000ng/mL (Може да се открие до 4 дни след употреба).

Тестът се използва, за да се добие визуален резултат и е предназначен за употреба от здравни и други професионалисти, за да способства откриването на наркотични вещества.


**В химичния анализ хроматографията е лабораторна техника за разделяне на смес на нейните компоненти. Хроматографският имуноанализ е техника, при която антитяло или агент, свързан с антитяло, се използва като част от хроматографска система за изолиране или измерване на специфична цел.*

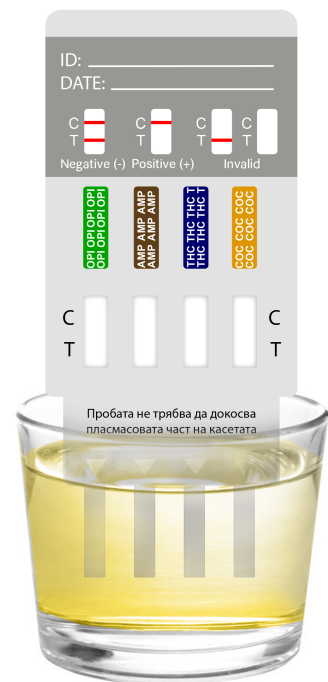

ПОТОПЕТЕ
Потопете за 10-15 секунди



ИЗЧАКАЙТЕ
Изчакайте 5 минути

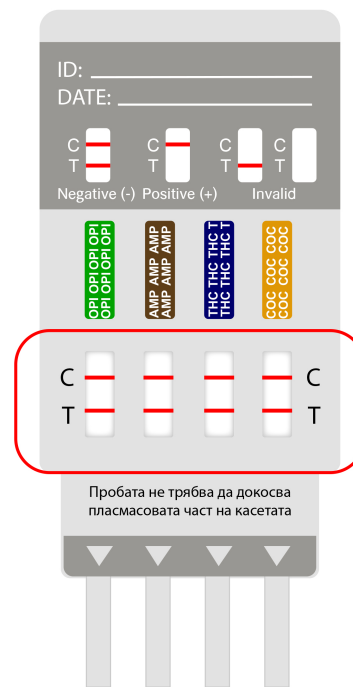

РАЗЧЕТЕТЕ
Разчетете резултата

БЪРЗ И НАДЕЖДЕН РЕЗУЛТАТ В ТРИ ЛЕСНИ СТЪПКИ

Време за теста: 5-7 мин.

Открива наличие на Амфетамин, Марихуана, Кокаин и Опиати в човешка урина.

Резултати след 5 минути.

Точност: 99,99%.

Лесни за разчитане резултати.

Съхранение при стайна температура (4°C-30°C).

1 тест в кутия

ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ:

- 1 бр. индивидуално опакована тест-касета.
- 1 бр. инструкции за употреба.

НЕОБХОДИМИ, НО НЕПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ:


- Контейнер за урина.
- Таймер/ хронометър.




1. Име и дата
2. Идентификатор на наркотика
3. Прозорец за резултати
4. Абсорбиращи панели
5. Предпазна капачка

Оставете теста и пробите да достигнат до стайна температура (15-30°C) преди употреба.


1. Извадете тест касетата от защитната опаковка и я поставете на чиста и равна повърхност. За най-добри резултати, тестът трябва да се извърши в рамките на един час.
2. Отстранете капачката от края на касетата и потопете тест лентите на картата вертикално в пробата от урина за най-малко 10-15 секунди. Внимавайте при потапянето урината да не докосва пластмасовата част на касетата.
3. Поставете тест касетата на неполиваща, равна повърхност, стартирайте хронометъра и изчакайте да се появят една или няколко червени линии. Резултатът трябва да се отчете след 5 минути. Резултат, отчетен след 8 минути не е валиден.

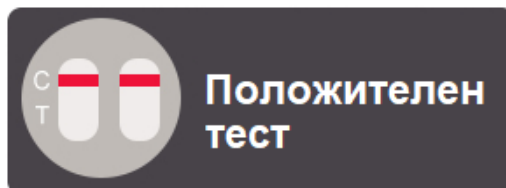

Положителен: Само една цветна линия се появява в контролната зона (C). В тестовата зона (T) не се появява видима линия.

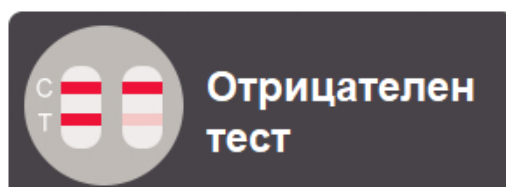

Отрицателен: Две цветни линии се появяват на мембраната. Едната се намира в Контролната зона (C), а другата – в Тестовата зона (T).

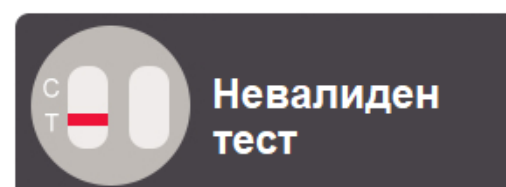

Невалиден: Не се появяват контролни линии. Резултатите от всеки тест, при който не са се появили контролни линии в указаното време, трябва да се считат за невалидни. Моля преразгледайте процедурата и повторете тестването с нов тест. Ако проблемът се повтори, спрете употребата на теста и се свържете с местния доставчик.

Забележка:

1. Яркостта на цвета в Тестовата зона (T) може да варира в зависимост от концентрацията на анализи в пробата. Затова, независимо от яркостта, ако линията е видима, то тестът трябва да се счита за отрицателен. Имайте предвид, че този тест е качествен и не може да даде информация за концентрацията на анализи в пробата.
2. Недостатъчно количество проба, неправилна процедура или тест с изтекъл срок на годност са най-честите причини за невалиден резултат.

Комплектът трябва да се съхранява на 4-30 градуса по Целзий до изтичане на срока, отпечатан на защитната опаковка.

Тестът трябва да остане в защитната опаковка до момента на използването му.

Не замразявайте.

Трябва да се вземат мерки да се предпазят компонентите на комплекта от замърсяване. Не използвайте теста, ако има следи от микробно замърсяване или овлажняване. Биологичното замърсяване на компонентите за дозиране, контейнерите или реактивите може да доведе до неверни резултати.

Тестът е разработен за употреба единствено с човешка урина.

Положителен резултат с който и да е тест, сочи за наличието на наркотик / метаболит и не дава информация за нивото на интоксикация.

Ако е открито наличие на наркотик/ метаболит в пробата от урина, тестът не дава информация за честотата на употреба и не прави разлика между наркотици и някои храни или лекарства.