



БЪРЗ



ЛЕСЕН



ТОЧЕН



Нашата амбиция е да направим здравеопазването широко достъпно в световен мащаб, чрез бързи тестове за лична употреба.

Водени от иновативен дух, **Advent Life** специализира в производство и разпространение на бързи тестове за широк спектър от здравословни състояния като същевременно предлага и други продукти, които позволяват на всеки да се погрижи за здравето си. Даваме възможност на хората да направят първата крачка сами и в удобно за тях време.

Advent Life се фокусира върху най-доброто качество на безопасни и лесни за използване продукти. Предлагаме премиум марки, които се доставят до аптеки, болници, лаборатории, обществени организации и държавни институции.

За повече информация, посетете www.adventlife.net.

МЕНОПАУЗА

Менопаузата се причинява от изменението на хормоналния баланс в женския организъм. Тази промяна започва най-общо, когато жената наближи 45-годишна възраст. Въпреки това истинските симптоми се забелязват около 55-годишна възраст. Промяна в продължителността и нередовност на месечния цикъл са първите симптоми за началото на менопауза (пери-менопауза).

ФОЛИКУЛСТИМУЛИРАЩ ХОРМОН (FSH)

Фоликулостимулиращият хормон (FSH) е хормон, който се увеличава по време на менопаузата. MENO-CHECK® може да открие наличието на FSH в урината, в момента, в който концентрацията надвиши 25 mIU/mL.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?

Менопаузата се причинява от значителни промени в хормоналния баланс. Варирането в продължителността на менструалния цикъл често е първият симптом за настъпването на менопауза. Други симптоми са:

- Топли вълни
- Безсъние
- Сърцебиене
- Ранички в устата, афти
- Гингивит
- Косопад
- Влагалищна сухота
- Остеопороза
- Втрисане или прекомерно изпотяване

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА FSH В ПРОБА ОТ УРИНА (В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоликулстимулиращият хормон (FSH) е хормон, който се увеличава по време на менопаузата. MENO-CHECK® може да открие наличието на FSH в урината, в момента, в който концентрацията надвиши 25 mIU/mL.

Тестът MENO-CHECK® служи за откриване на високи нива на фоликулстимулиращ хормон в урината, което е индикатор за настъпваща менопауза.

В теста MENO-CHECK® се използва двойка антитела за специфичното откриване на човешки FSH. Контролна линия, която улавя излишъка от реактив се появява в контролната зона на теста. Ако тестът е положителен, това означава, че концентрацията на FSH е по-висока от 25 mIU/mL (определено в съответствие с разписанията на Световната здравна организация).

БЪРЗ И НАДЕЖДЕН РЕЗУЛТАТ

Време за теста: 10-15 мин.

Съхранение при стайна температура (4°C-30°C). Не замразявайте.

2 теста в кутия.

Фоликулостимулиращият хормон (FSH) е хормон, който се увеличава по време на менопаузата. MENO-CHECK® може да открие наличието на FSH в урината, в момента, в който концентрацията надвиши 25 mIU/mL.

Лесни за разчитане резултати.

Тестът MENO-CHECK® е много точен и се използва в продължение на над 10 години от професионалисти в областта. Докладите за оценка показват средно съответствие от 92,8% с референтния метод. Въпреки че тестът е надежден, има случаи, когато се получават фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати.

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА

Чувствителност: 100 %

Специфичност : 100 %

Точност: 100 %

Комплектът съдържа **два MENO-CHECK® теста** и една листовка.

Всеки тест е запечатан в индивидуална алуминиева опаковка, в която е поставен и изсушител. Устройството трябва да остане в запечатаната опаковка до момента на употреба. Изсушителят трябва да се изхвърли.


НЕОБХОДИМИ, НО НЕПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ:

Таймер / Хронометър.



Процедурата по тестване винаги започва с внимателна подготовка. Поставете съдържанието на кутията на чиста, суха и равна повърхност (напр. маса). След това пристъпете към тестване:

1. Извадете устройството MENO-CHECK® от защитната алуминиева опаковка, като я скъсате на маркираното за това място. Изхвърлете пакетчето с изсушител.
2. Отстранете капачката на MENO-CHECK® устройството. Обърнете устройството така, че повърхността, на която няма дисплей, да е обърната към вас, а абсорбиращият край да сочи надолу.
3. Задръжте абсорбиращия край на устройството директно под струята урина за 5 до 10 секунди. Уверете се, че в прозорчето на теста и в контролната зона няма да попаднат капчици урина. Ако предпочитате, може да съберете проба от урина в чист и сух контейнер (такъв не е предоставен в комплекта) и да потопите абсорбиращия край на теста в урината за 10 секунди.
4. Върнете капачката върху MENO-CHECK® устройството. По този начин пробата влиза в контакт със специфични реактиви и процесът на изследване ще започне.
5. Поставете MENO-CHECK® устройството на суха и равна повърхност с прозорчето нагоре.
6. Отчетете резултата след 10 минути. Не отчитайте резултати след повече от 15 минути.

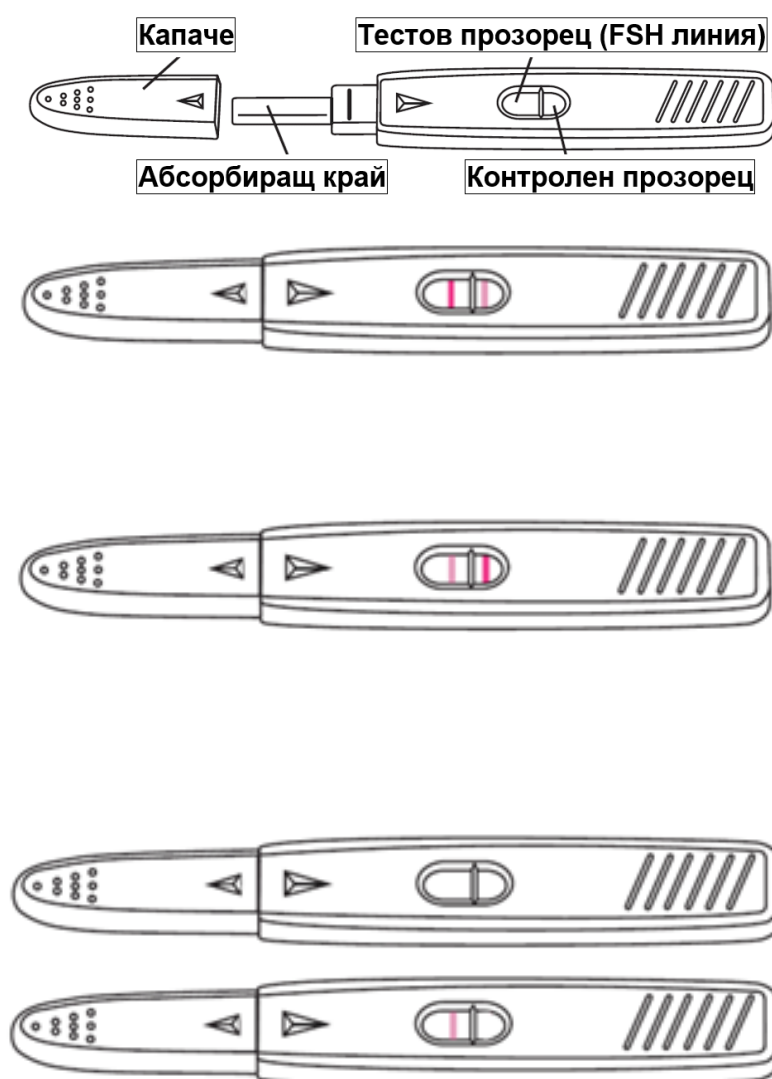

За да интерпретирате резултатите, е необходимо да сравните оцветяването на FSH линията (Тестов прозорец) с оцветяването на контролната линия (Контролен прозорец).

Положителен резултат:

Тестът е положителен, ако FSH линията е по-наситена от Контролната линия. Този резултат означава, че нивото на FSH е равно или по-високо от 25 mIU/mL. В този случай, втори тест трябва да се направи 5 до 7 дни след първия, тъй като нивата на FSH се менят по време на менструалния цикъл. Ако се потвърди положителният резултат, е възможно да сте в процес на менопауза и ви съветваме да се консултирате със своя гинеколог за окончателно диагностициране.

Отрицателен: Резултатът е отрицателен, ако Контролната линия е по-тъмна от FSH линията. Този резултат означава, че концентрацията на FSH е по-ниска от 25 mIU/mL и вие вероятно не сте в процес на менопауза.

Внимание: в някои случаи, FSH линията може да не се появи въобще.

Невалиден: Когато не се появи Контролна линия, е невъзможно тестът да се интерпретира, затова се счита за невалиден. В такъв случай, препоръчваме да повторите тестването с ново MENO-CHECK® устройство и нова проба от урина.

Забележка:

Яркостта и цветът на линиите нямат никакво значение за интерпретирането на резултатите.

Тестът е създаден само за инвитро диагностика. Само за външна употреба. **ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА.**

Внимателно прочетете инструкциите за употреба преди да си направите теста. Резултатите са надеждни само ако процедурата, описана в листовката е била изпълнена точно.

Да се съхранява при температури между +4° С и + 30° С. **Да не се замразява.**

Да не се използва след изтичане на срока на годност (отпечатан на кутията и върху алуминиевата опаковка), и в случай, че защитната опаковка е с нарушена цялост.

Не използвайте MENO-CHECK® повторно.

Пазете далеч от деца.

Не използвайте урина от бременни жени или такива, подложени на хормонално лечение.

След употреба, всички компоненти могат да се изхвърлят в обикновена кофа за отпадъци.